

# AUFSETZANLEITUNG MUND-NASEN-SCHUTZ

Nicht vergessen:  
Vor Kontakt mit der Maske  
Hände desinfizieren!



Legen Sie die Maske mit der weißen Seite nach innen und dem Nasenbügel am oberen Maskenrand über Nase und Mund des Gesichts und führen Sie die elastischen Ohrenschlaufen um die Ohren.



Drücken Sie den Nasenbügel am oberen Maskenrand mit den Fingerspitzen auf beiden Seiten der Nase an den Nasenrücken.



Ziehen Sie die Maske im Mundbereich nach unten über das Kinn, damit sie nicht knittert und Nase und Mund bestmöglich bedeckt sind.



Überprüfen Sie den Sitz der Maske und drücken Sie sie auf das Gesicht, um Leckagen zu minimieren.

**Hinweis für Brillenträger:** Setzen Sie Ihren Brillen etwas weiter nach vorne auf den Nasenrücken, so verringern Sie das Beschlagen der Brille.

