

AUFSETZANLEITUNG FFP2-MASKE

Nicht vergessen:
Vor Kontakt mit der FFP2-Maske
Hände desinfizieren!



Abbildung
beispielhaft



Halten Sie die Maske auf dem Gesicht und ziehen Sie die Ohrschlaufen über die Ohren. An einer der Ohrschlaufen befindet sich ein Ohrensicherer, mit dem die beiden Ohrschlaufen hinter dem Kopf verbunden werden können, um Druck von den Ohren zu nehmen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn die Maske über einen längeren Zeitraum oder täglich getragen wird. Wenn der Ohrensicherer nicht verwendet wird, kann er leicht von der Ohrschleife entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass der Nasenclip nach oben zeigt.



Drücken Sie den Nasenclip, um ihn an die Form der Nase anzupassen.



Überprüfen Sie den Sitz der Maske und drücken Sie sie auf das Gesicht, um Leckagen zu minimieren.

